

SISTEMA MISS

SISTEMA MINIMO INVASIVO





Índice


03 Componentes

06 Técnica Quirúrgica



Componentes

Introduccion de barras
308 004 31

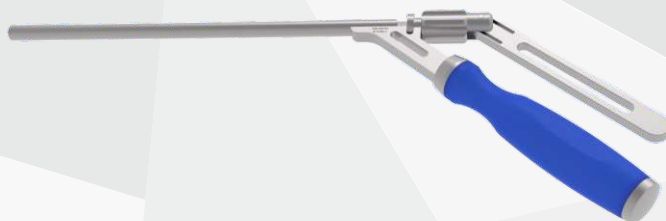

Baja barras
308 028 03



Torquimetro
308 025 009



Levanta Prisionero
308 027 04



Tubo centrador de tapón Miss
308 120 01



Atornillador
308 031 00





Componentes

Insertor de clavijas
308 121 00



Aguja Iniciadora con trocar



Dilatadores
308 122 00
308 122 01
308 122 02
308 122 03
308 122 04
308 122 05



Alambre guía



Macho Canulado
ø5 308 035 26
ø6 308 035 27
ø7 308 035 14





Componentes

Mango en T con acople rápido
308 012 02




Atornillador con acople
308 008 04



Atornillador
308 008 04




Alineador de tornillos

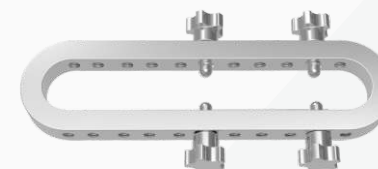

Prolongador de tornillo Miss
308 120 01



1
Marcación

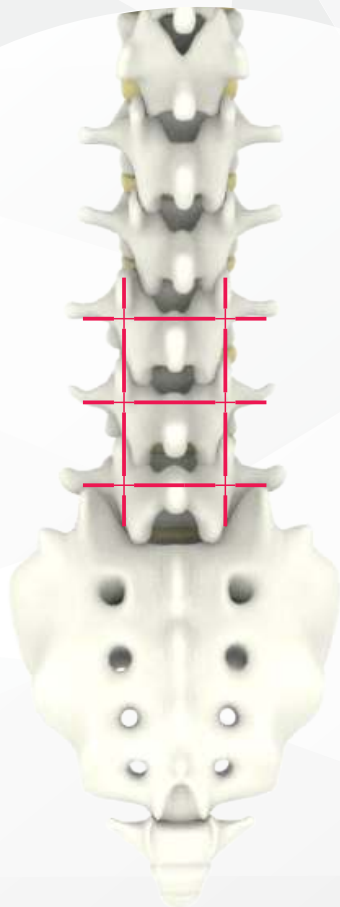

2
Colocar aguja con trocar






Técnica Quirúrgica


3
Retirar Trocar



4
Presentar alambre guía

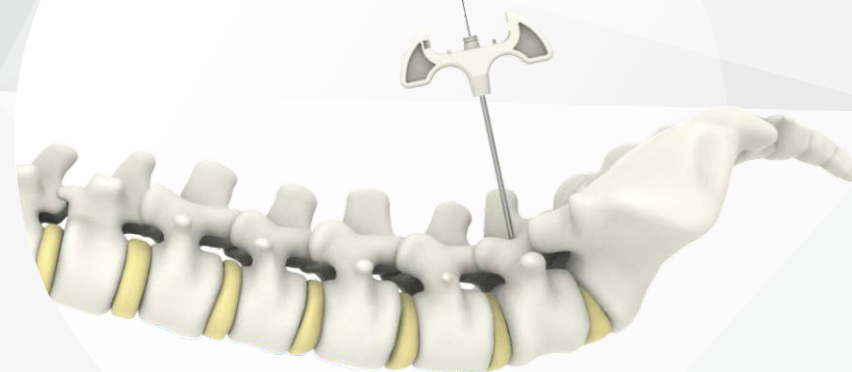


5
Introducir el alambre guía

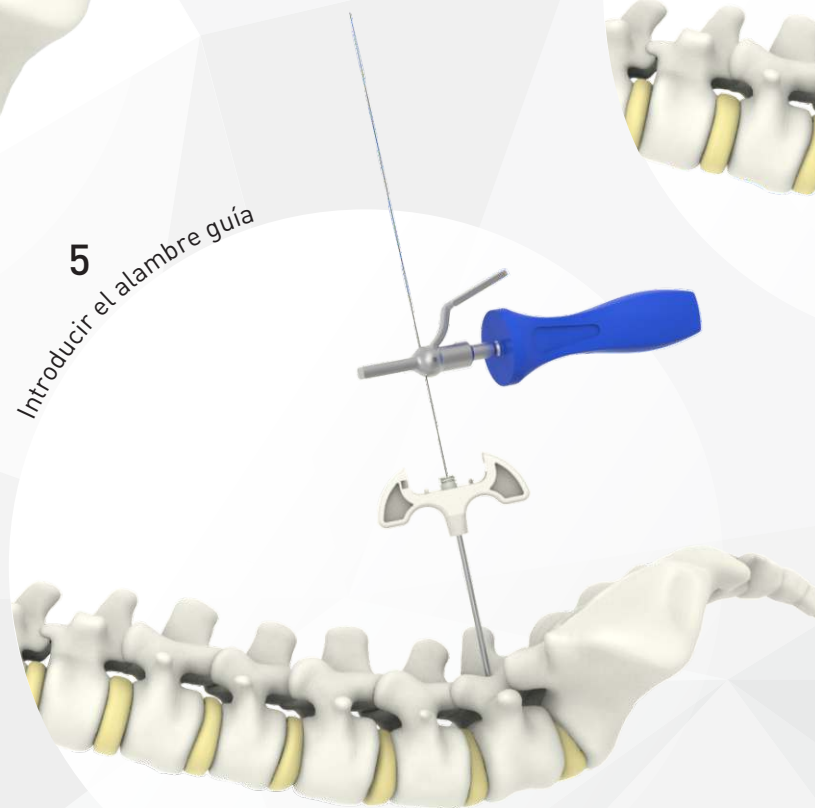




Técnica Quirúrgica


6
Retirar aguja

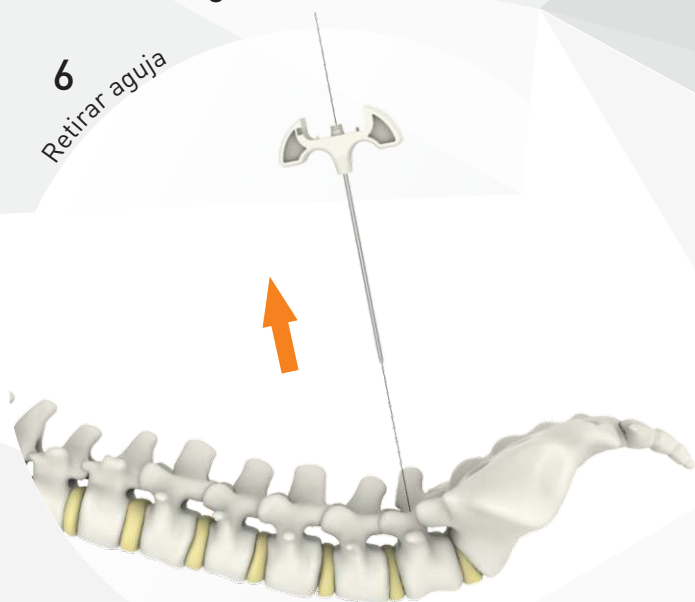


7
Colocar los dilatadores

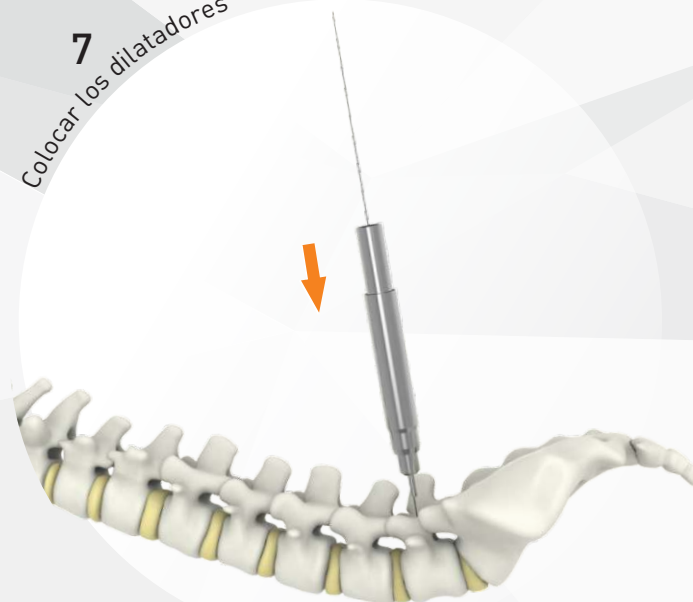

8
Retirar dilatadores excepto el de mayor diámetro

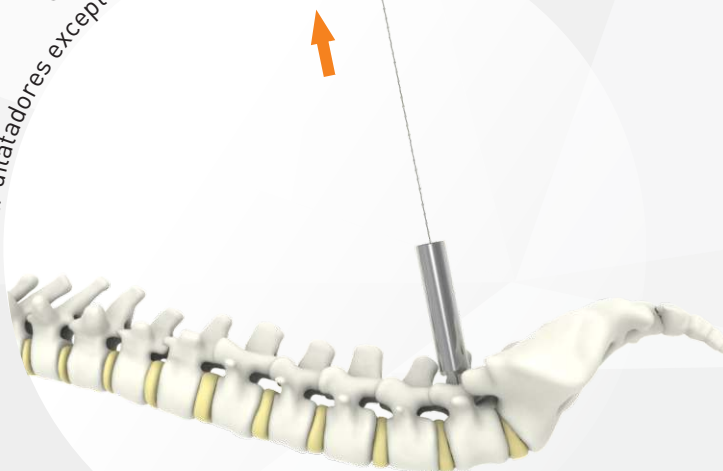

9
Introducir macho canulado y medir

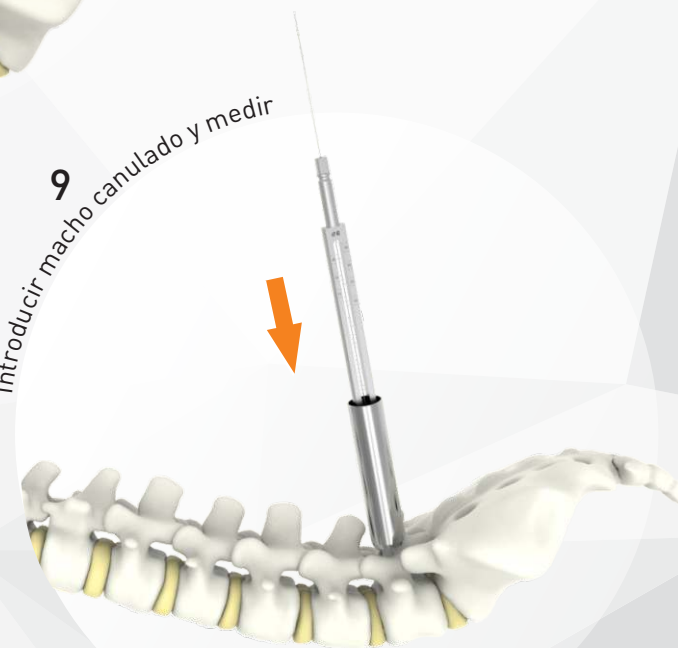



Montar tornillo en Prolongador de Tornillo Miss

10 Girar para desbloquear



Desbloquear y colocar tornillo




Girar para bloquear




Tornillo colocado y bloqueado




Detalle bloqueado sin tornillo

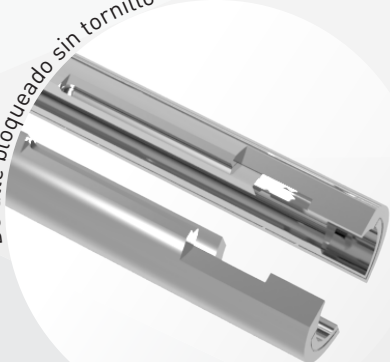


Detalle desbloqueado sin tornillo

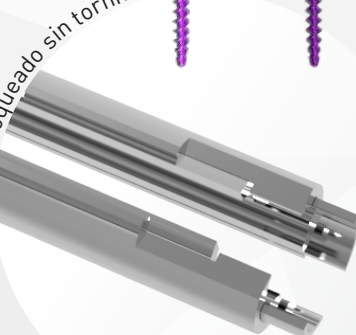

Detalle desbloqueado con tornillo

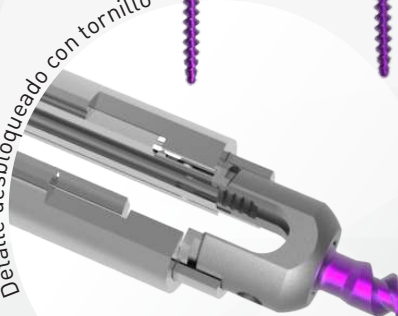

Detalle bloqueado con tornillo

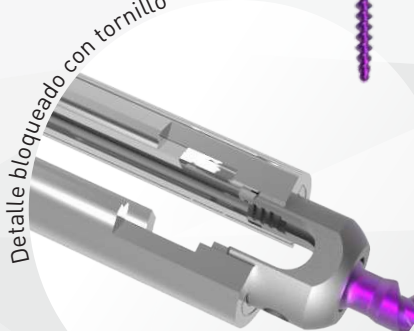



Técnica Quirúrgica

11



Montar el atornillador
en el Prologador de tornillo Miss


12

Introducir el conjunto y atornillar




13

Repetir los pasos para cada implante

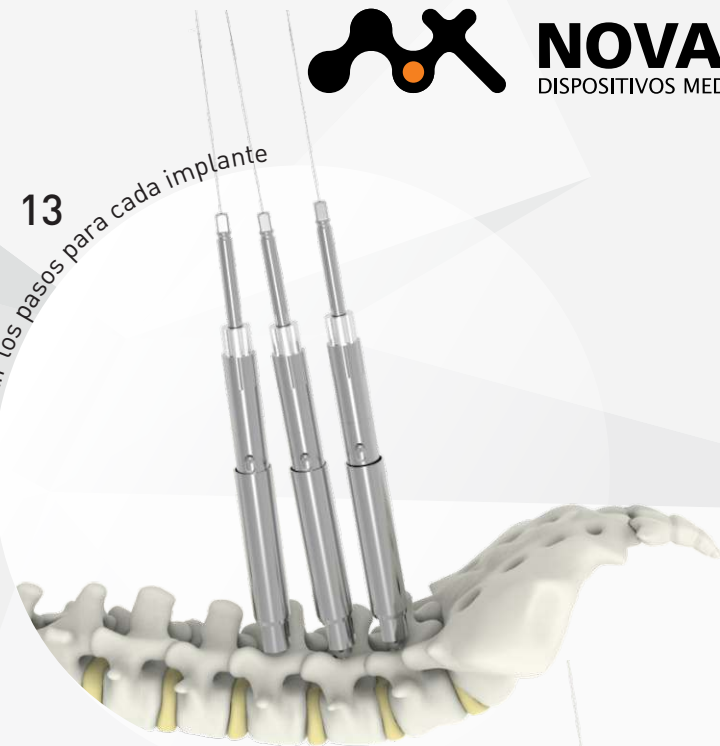

14

Retirar los atornilladores

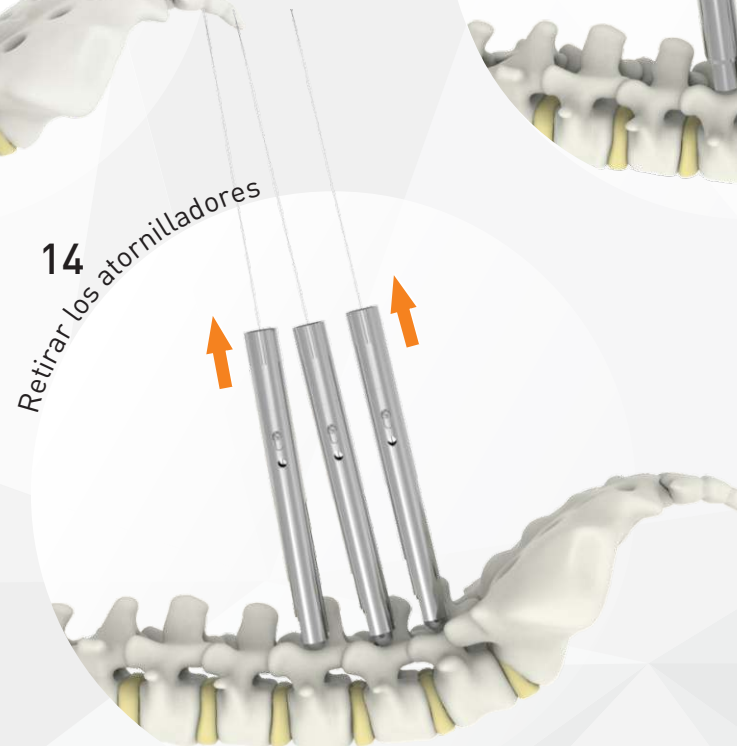


Vista Trasera. Colocación en ambos laterales






Técnica Quirúrgica


15 Montar barra en Introducutor

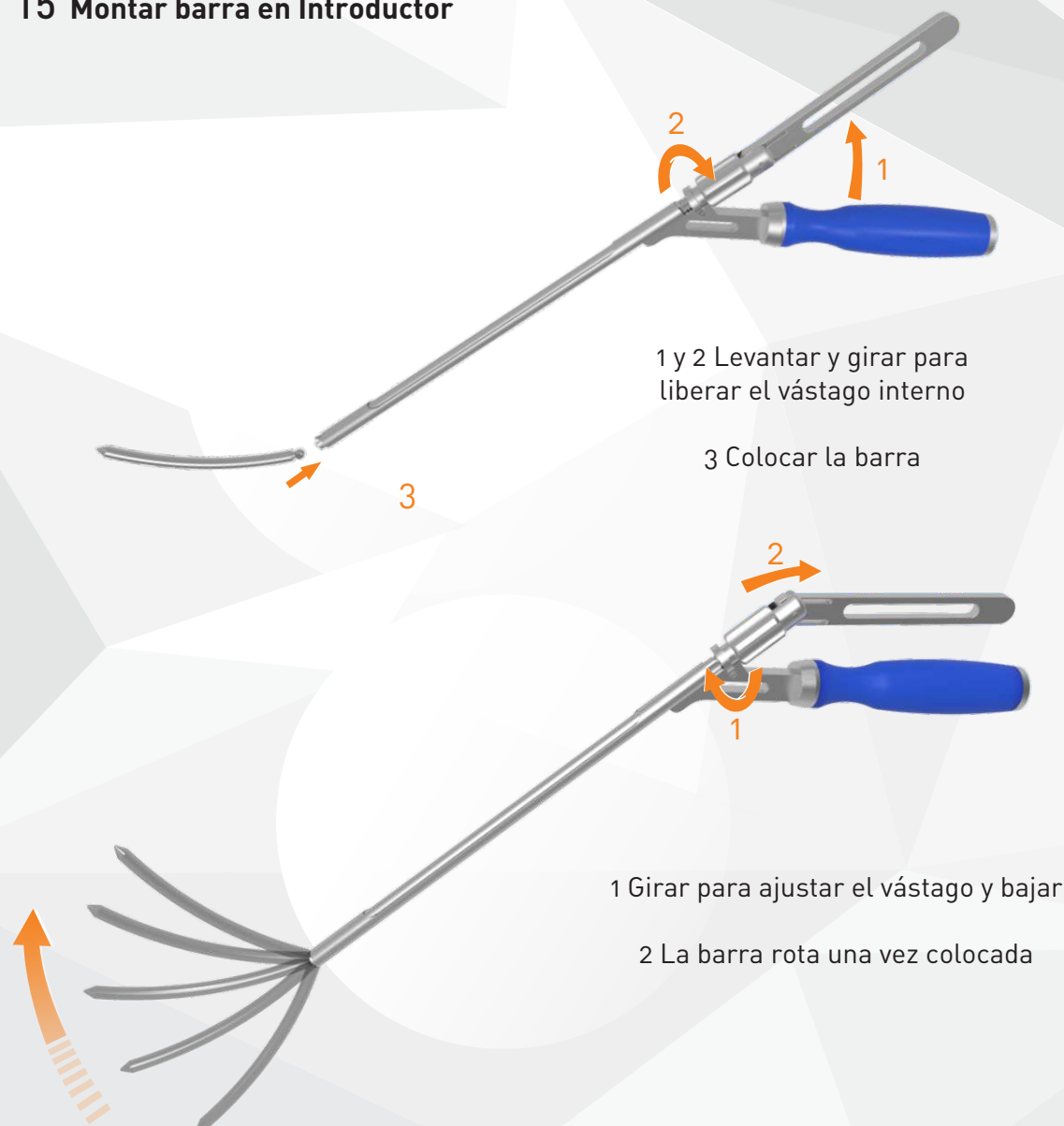

16 Colocar alineador de tornillos en los Prolongadores de Tornillo Miss

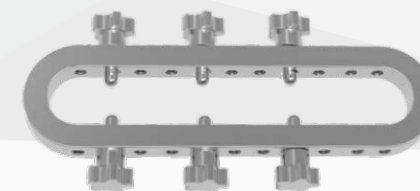

Armar el Alineador de tornillos

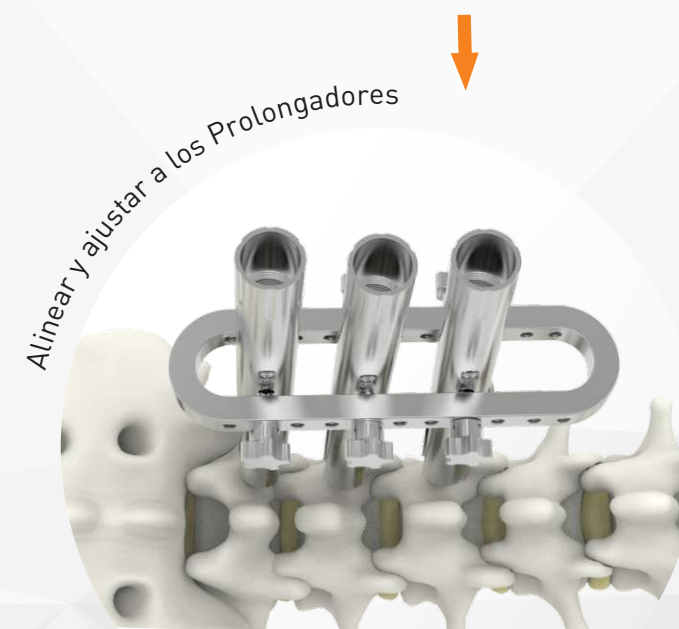




Técnica Quirúrgica

Colocación de la barra

17

Posicionar el Introduc-
tor de barras

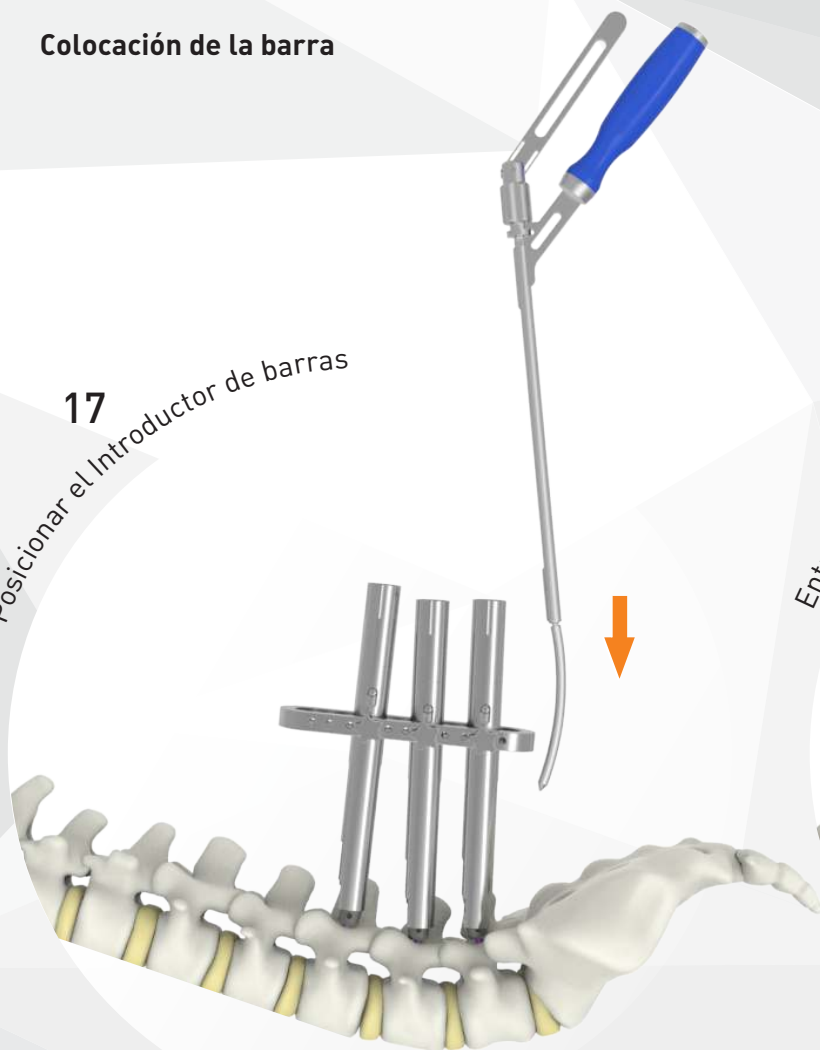

Entrada de introductor de barras






Detalle entrada de barra



Detalle entrada de barra
Vista Trasera



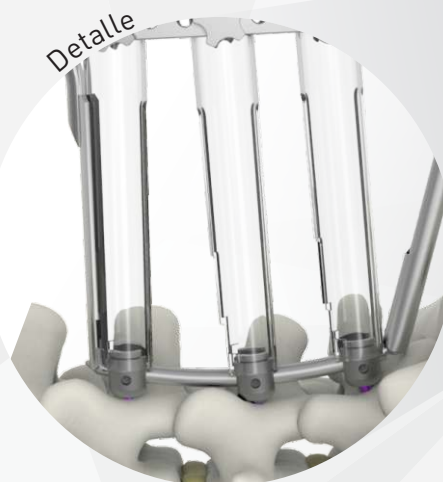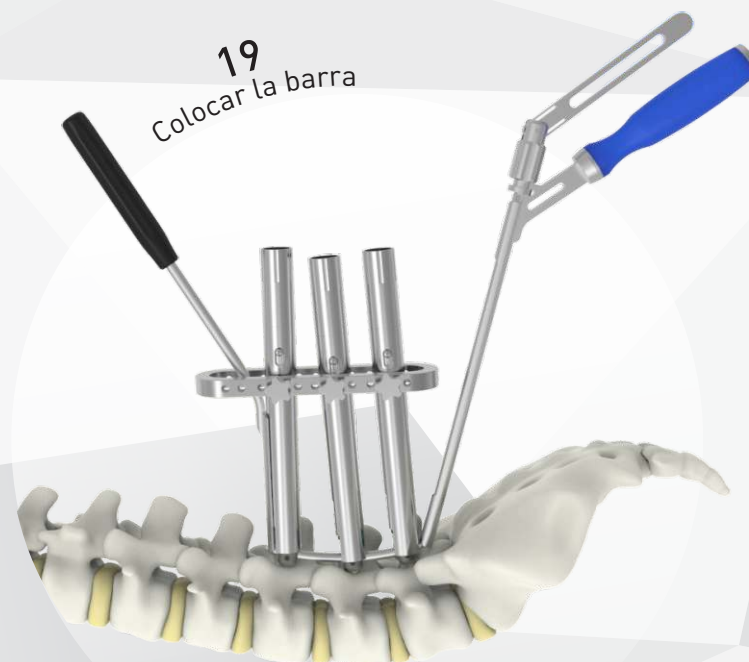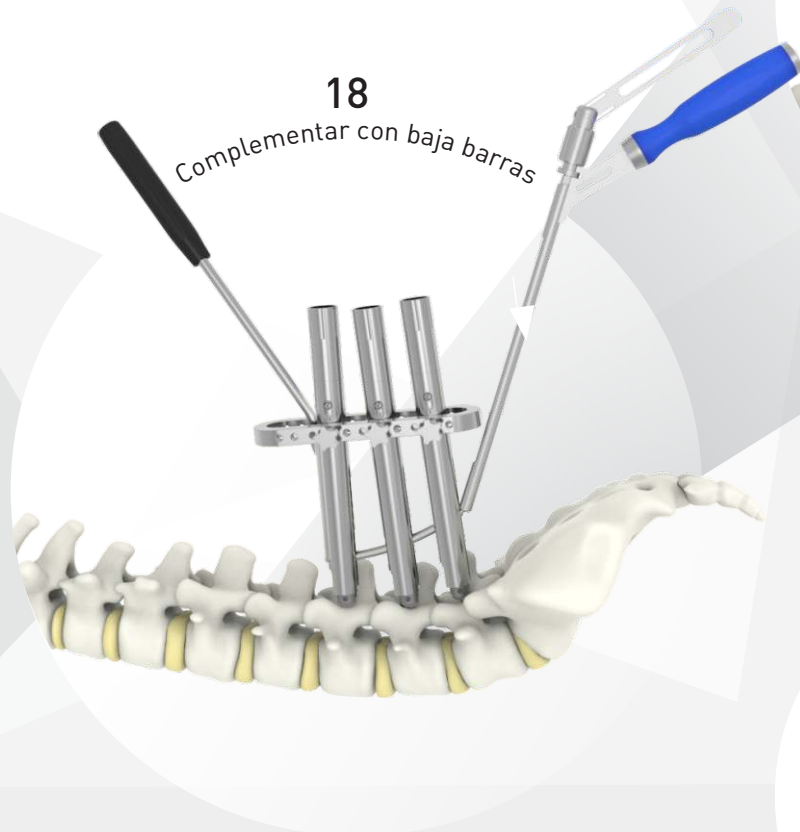



Técnica Quirúrgica


20
Centrar los tapones




Detalle entrada de tapones centrados




21
Retirar el centrador y levanta tapón

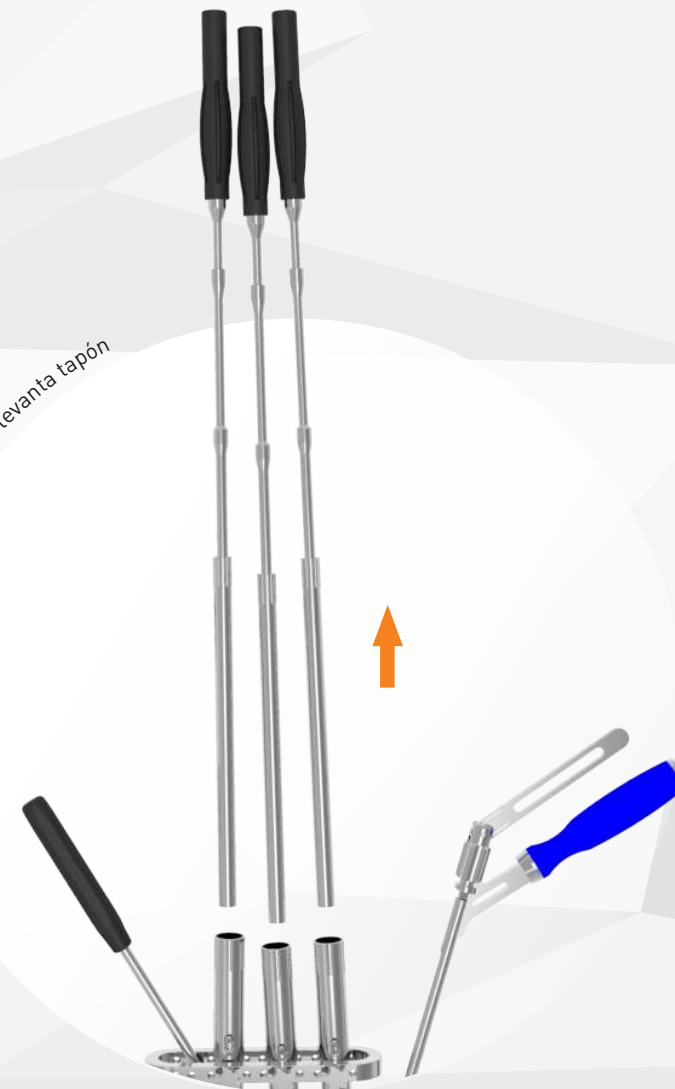

Detalle colocación tapones

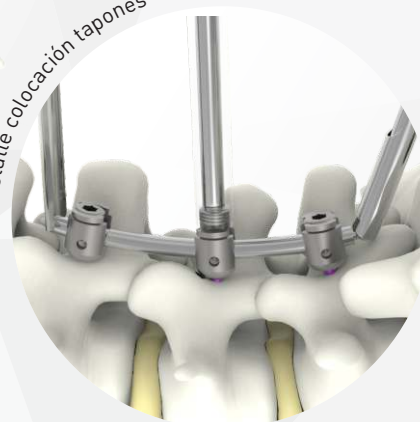

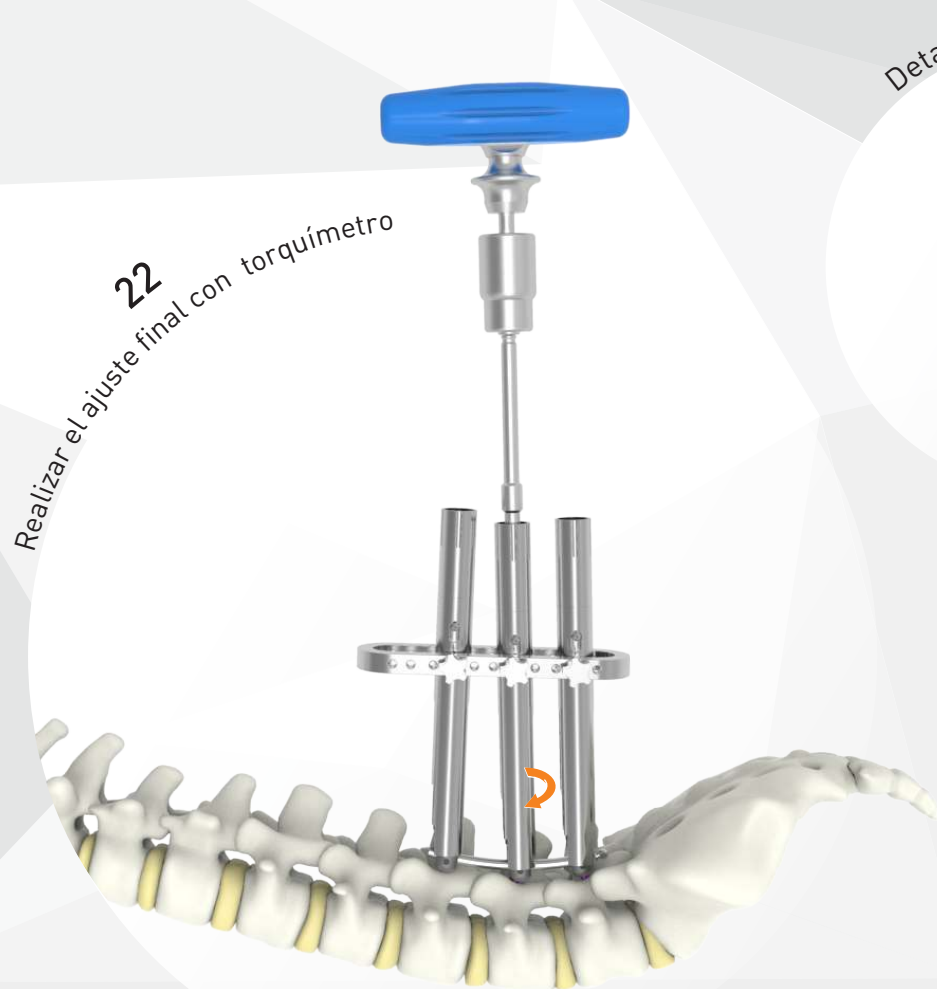

Detalle ajuste




Detalle colocación completa




22

Retirar los Prologadores de tornillos

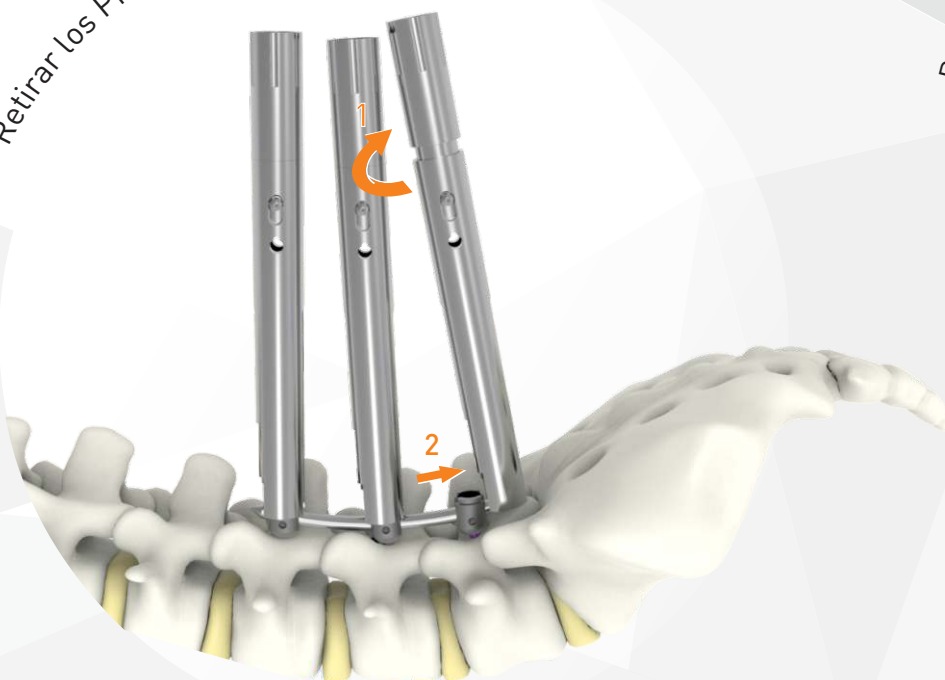

23

Repetir los pasos en ambos laterales

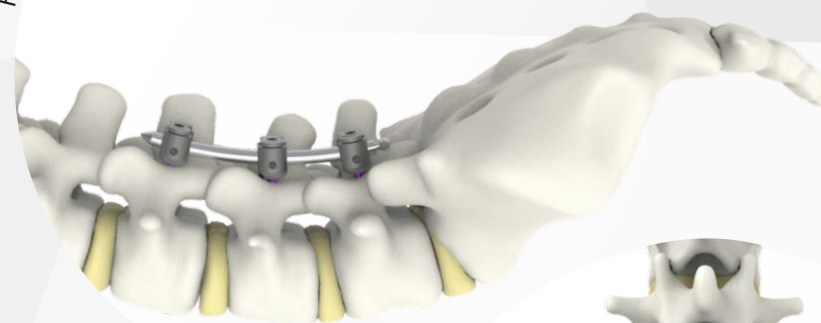

Publicado: 28-12/2015
Revisado: B 04-03/16
17 pag.



www.novaxdma.com



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

Novax DMA - Manuel Fraga 923. Ciudad de Bs. As.- Argentina
Tel/Fax:(011) 4554 6430